

# COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST

## **Gewissheit nach rund 15 Minuten**

Das COVID-19 Antigen Schnelltestkit (Abstrich) ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Protein-Antigen in direkten Nasenabstrich- oder Nasopharyngealabstrichproben von Personen, bei denen der Arzt innerhalb der ersten sieben Tage nach Symptom, Verdacht auf COVID-19 hat.

Das BfArM hat für diesen Artikel eine Sonderzulassung nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 erteilt. Damit kann dieser Schnelltest auch durch Laien angewandt werden.

**Die Registrierungsnummer ist 5640-S-123/21.**

### **Inhalt einer Box:**

25 Testkassetten (jede verpackt in Folienbeutel), 25 Nasentupfer,  
25 Extraktionsröhrchen mit Puffer, 25 Extraktionsspitzenkappen,  
1 Arbeitsstation, 1 Packungsbeilage



---

### **Serwo GmbH**

Halberstädter Str. 19 · 39435 Egel  
Telefon 039268 - 3025-0 · Telefax 039268 - 3025-18  
info@serwo.eu · www.serwo.eu




## Covid-19 Antigen Schnelltest

- Verwendungszweck: Test von SARS-CoV2-Antigen
- Probe: Nasentupfer oder Nasopharyngealabstrichproben
- Testergebniszeit: 10 – 15 Minuten
- Gesamtgenauigkeit: 98,50 %
- Verpackung: 25 Stück/Box
- Lagerungsinweise: 4 – 30 °C
- Mindesthaltbarkeit: 24 Monate nach Herstellungsdatum

### Probenvorbereitung und Prüfverfahren

#### Vorbereitung Extraktionslösung

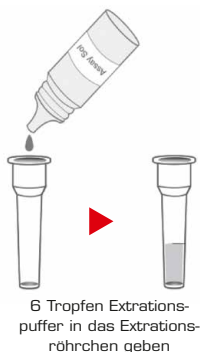

6 Tropfen Extraktionspuffer in das Extraktionsröhrchen geben




Nasopharyngeal-Region



Nasen-Region

#### Assay-Verfahren

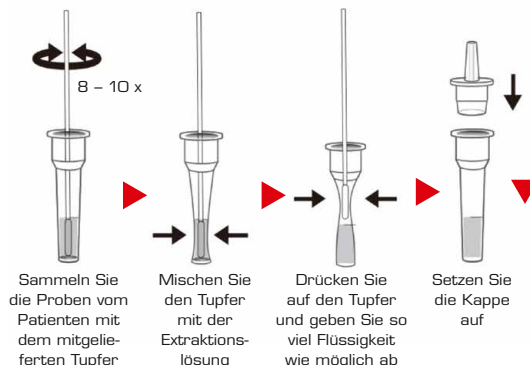


Sammeln Sie die Proben vom Patienten mit dem mitgelieferten Tupfer

Mischen Sie den Tupfer mit der Extraktionslösung

Drücken Sie auf den Tupfer und geben Sie so viel Flüssigkeit wie möglich ab

Setzen Sie die Kappe auf


### Interpretation des Assay-Ergebnisses

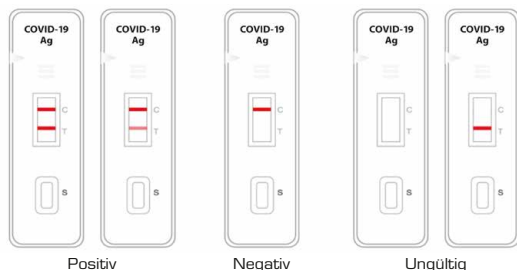

Positiv

Negativ

Ungültig

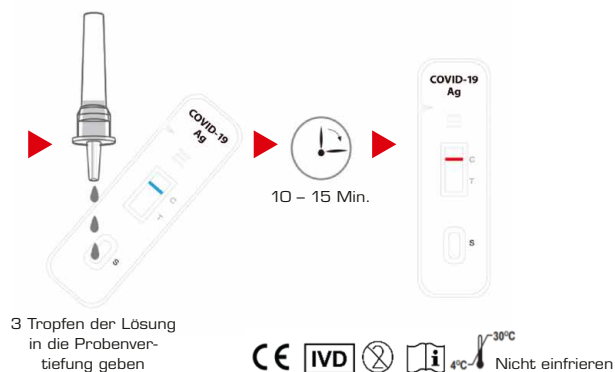

3 Tropfen der Lösung in die Probenvertiefung geben

10 – 15 Min.

CE IVD 4°C <sup>30°C</sup> Nicht einfrieren

**Serwo GmbH**

Halberstädter Str. 19 · 39435 Egel  
Telefon 039268 - 3025-0 · Telefax 039268 - 3025-18  
info@serwo.eu · www.serwo.eu